



GlobalDentt
PRODUCTOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS



Selladora Cortadora



DATOS TÉCNICOS

Voltaje y Frecuencia: 110V- 50-60Hz
Potencia: 100 W
Longitud del sellado: 250mm
Ancho del sellado: 10mm
Peso: 7Kg
Calentamiento: monolateral
Puesta en marcha: manual
Dimensiones:
-Ancho: 445mm
-Altura: 205mm
-Profundidad: 325mm
Garantía de un año a partir de su adquisición

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

La selladora cortadora es un equipo diseñado para el sello y corte de bolsas y rollos de papel/polipropileno que contienen material quirúrgico de diagnóstico médico o instrumentos, por ejemplo: tijeras, bisturíes, gasas, etc.

Tiene un interruptor de encendido y apagado, y posee un LED que informa el estado del sellado de acuerdo a temperatura y operación del equipo.

PRECAUCIONES

Las condiciones de operación del equipo no pueden ser modificadas, funciona a una temperatura ambiental de 15-35°C, una humedad relativa de 35-85% y un voltaje de 110 o 220 voltios. No se debe verter líquidos en el interior, no se debe sumergir, sólo se puede usar en interiores, antes de proceder a su limpieza se debe desconectar de la toma corriente, no utilizar limpiadores corrosivos o abrasivos. Debe ser enviado al fabricante para su reparación. Debe tenerse seguridad que esté conectado con la potencia

Selladora Cortadora

CARACTERISTICAS

- FÁCIL LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN.
- PERMITE SELLAR Y CORTAR BOLSAS Y ROLLOS DE USO EN AUTOCLAVE.

Manual de Procedimiento

INSTRUCCIONES DE USO

Coloque el equipo en una superficie nivelada, a temperatura ambiente en un cuarto destinado únicamente para sellar/cortar las bolsas y rollos de esterilización de materiales.

Si va a colocar rollo retire la barra y ubique el papel y deslícelo de manera tal que salga por la barra de calentamiento, hacia adelante del equipo.

Conecte el equipo a la red eléctrica y enciéndalo. El equipo cuenta con un LED de color verde que informará el estado del proceso.

Durante el proceso no introduzca los dedos en el equipo, una vez inicia el calentamiento.

Para el correcto uso del equipo debe leer las condiciones establecidas en el manual.



FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN

Verificar SIEMPRE el estado de color del LED del equipo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Podrá ser hecha la limpieza con soluciones de desinfectantes para superficies, usando un paño limpio semanalmente.

Evite usar otras sustancias que puedan dañar el equipo



CONTÁCTENOS

www.globaldent.com.co

servicioalcliente@globaldent.com.co

DETALLES DE GARANTÍA

Debe tener en cuenta para la garantía:

- No se recibirán equipos por daños por mal uso.
- Alteración, modificación de cualquier especie en el dispositivo como en reparaciones hechas por un técnico no autorizado.
- Defectos ocasionados por piezas no originales.
- Defectos ocasionados por conexión a una red eléctrica no estable que presente fluctuación extrema del voltaje.
- Daños en la parte externa del dispositivo causados por caídas.

CONTRAINDICACIONES:

No debe ser usado con otro fin diferente que el sellado y cortado de las bolsas o rollos para esterilización

Manténgase en lugares con temperatura y humedad controladas.

INNOVANDO CON SOLUCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS